

8.仕様

項 目	規 格		
品 名	ハイ・オートクレーブ		
型 式	HAC-316FD	HAC-260FD	HAC-220FD
製 造 販 売 承 認 番 号	21900BZX00925000	21900BZX00921000	21900BZX00915000
寸 法 間 口 × 奥 行 × 高 さ	590mm×590mm×447mm	498mm×498mm×387mm	466mm×430mm×367mm
滅菌室 間 口 × 奥 行	316mm×421mm	260mm×375mm	220mm×350mm
熱 滅 菌 ヒ ー タ	AC 100V 1500W	AC 100V 1400W	AC 100V 1200W
源 乾 燥 補 助 ヒ ー タ	AC 100V 240W	AC 100V 240W	AC 100V 60W
電 電 源 入 力	1500VA	1400VA	1200VA
電 電 源 電 圧	AC 100V		
源 電 源 周 波 数	50Hz/60Hz		
消 費 電 力	1500W	1400W	1200W
電 撃 対 対 する 保 護 の 形 式	B形		
電 撃 対 対 する 保 護 の 程 度	I形		
最 高 使 用 圧 力	0.12MPa	0.22MPa	0.22MPa
滅 菌 室 内 容 積	0.03269m ³	0.01963m ³	0.01329m ³
安 全 装 置	安 全 弁	低揚程バネ安全弁	
	ふたスイッチ	ドアスイッチ	
	ヒューズ	20A×2	
	滅菌室ヒータサーモ	設定温度200℃	
置	加温防止サーモ	設定温度250℃（電源スイッチに連動）	
	滅 菌 時 間	121℃ 20～99分(設定可変)	132℃ 5～99分、121℃ 20～99分(設定可変)
乾 燥 時 間		0～99分（設定可変）	
デイスプレイ		滅菌時間・乾燥時間ディスプレイ	
表 示 ラ ン プ		電源ランプ、滅菌ランプ、乾燥ランプ、スタートランプ、アラームランプ	
操 作 キ ー		滅菌時間キー、乾燥時間キー、電源キー	
ス イ ッ チ	主電源スイッチ	AC 100V 16A	
	滅菌・乾燥スイッチ	有	
	温度切替スイッチ	無	121℃/132℃
	ドアスイッチ	有	
滅 菌 圧 力		0.12Mpa	0.12MPa/0.22Mpa
滅 菌 温 度		121℃	121℃/132℃
圧 力 計		直径50mm 0～0.4Mpa	
付 属 品		スノコ、水槽ふた、ヒューズ	
重 量		49kg	38kg 32kg
管理医療機器			
特定保守管理医療機器			
本製品はEMC規格JIS C 1806-1：2001 に適合している			
[EMC 適合]			

9.保証・保証期間・アフターサービス

1. 保証・保証期間について。
（1）本製品の保証期間は、御購入を頂いた日より1年間です。
（2）正常な使用における操作及び保守がされ、この保証期間に生じた故障については当社の保証規定により、無償で修理いたします。
（3）保証期間経過後の修理、点検のサービスについては、有料となります。
（4）本取扱説明書に記載されている注意事項をお守りにならないで誤った使用方法により、万一事故が発生した場合、当社の責めは御容赦願います。
2. アフターサービスについて
（1）御使用中に異常が生じたときは、直ちに使用を中止して販売店又は弊社へご連絡ください。
（2）修理、サービスについておわかりにならないときは、販売店又は弊社へご連絡ください。
3. 本機器は1年に1回定期メンテナンスを行ってください。
4. 本機器の法定耐用年数は4年です。4年以上ご使用の場合は必ずオーバーホールを行ってください。
4年経過後は3年毎にオーバーホールを行ってください。
5. 本製品の使用期限は正規の定期メンテナンス、オーバーホールを行った場合に限り、納入されたときから10年です。（自己認証）

製造業者及び製造販売業者

不二光学機械株式会社

本社 東京都文京区本郷3-35-4
TEL. 03-3813-3511
事業所 埼玉県草加市瀬崎7-8-13
TEL. 048-929-3511